

# ProClear™

ערכת הלבנה



מדריך למשתמש

# הוראות שימוש

הקפד לקרוא את הוראות השימוש טרם שימוש ראשוני



## שלב 1

**הכנה:** צחצחו את השיניים ושטפו את חלל הפה. ייבשו את השיניים והשתמשו בעט כדי למרוח על כל שן, מעט מג'ל ההלבנה.



## שלב 2

הניחו את הפיגה הייחודית עם מנורת ה-LED הכחול על השיניים וסגרו את הפה.



### שלב 3

**התחילו להלבין:** הפעילו את המכשיר והמתינו כ 15 דקות עד שמנורת ה- LED הכחול תיכבה אוטומטית.



בכדי להגיע לגוון הלבן הרצוי מומלץ להשתמש בערכה פעם ביום למשך 30 ימים.

הפיה המצורפת בערכה

### שלב 4

**שטיפה וניקוי:** לאחר שסיימתם, שטפו את הפיה, הפה והשיניים במי ברז. במידת הצורך ניתן להשתמש במברשת שיניים להוריד שאריות ג'ל

# ProClear

## טיפים להלבנת שיניים

וודאו שהפה, השיניים והפיה יבשים ונקיים לפני כל שימוש. קחו מספר נשימות עמוקות לפני כל טיפול, להאטת ייצור הרוק (עודף רוק יכול לדלל את הג'ל ולהפחית את האפקטיביות).

יש להקפיד למרוח מעט ג'ל ובאופן שווה על כל שטח השיניים. במידה והג'ל גלש לחניכיים ו/או לחלל הפה, יש לנקותו בעדינות. במידה ויש תחושת עקצוץ היא תחלוף לאחר מספר דקות.

טעינה מלאה של יחידת תאורת ה- DEL הכחול נמשכת כשעתיים. בזמן הטעינה, נורות ה-LED יתבהבו באופן רציף. כאשר יחידת ה- DEL הכחול טעונה במלואה, ניתן להשתמש בה כ- 15 פעמים.

הזמן המומלץ ביותר להלבנת שיניים הוא לפני שהולכים לישון. מומלץ שלא לאכול ו/או לשתות למעט מים, במהלך 30 דקות לאחר כל טיפול הלבנה.

ג'ל הלבנה אינו מתאים לשימוש על כתרים ותותבות ואינו מתאים לטיפול בשינוי צבע השיניים, הנגרמת ממצבים רפואיים אחרים.

השימוש בג'ל הלבנת שיניים אינו מתאים ולא מומלץ לילדים מתחת לגיל 12 או לנשים בהריון.

**חיי מדף:** 24 חודשים כאשר העט סגור. השלך לאשפה ג'ל הלבנה שנפתח ואינו בשימוש לאחר 21 חודשים.

**אחסון:** הימנע מחשיפה ישירה לאור השמש ואחסן במקום קריר ויבש. אין לשמור במקרר או במקפיא

**רכיבים:** Carbamide Peroxide, Glycerol, Propylene Glycol, Deionized Water, Carbomer, Carboxymethyl, Triethanolamine, Poly Vinylpyrrolidone, Menthol

למידע נוסף [www.proclearaligners.org](http://www.proclearaligners.org)