

ProClear™

הוראות הלבנה

- ✓ הקפד לטעון את מנורת ה-LED לפני השימוש. בהתאם להוראות במדריך המצורף.
- ✓ יש לשטוף את הפיה ואת הפה לפני ואחרי כלשימוש.
- ✓ הסתכל במראה או השתמש במצלמת הטלפון הנייד כדי להשוות את צבע השיניים שלך עם מדריך הצבעים המצורף לערכה ורשום את הגוון נוכחי שלך החיוך שלך.
- ✓ ייבש את השיניים. קח מספר נשימות עמוקות לפני כל טיפול להאטת ייצור הרוק (עודף רוק יכול לדלל את הג'ל ולהפחית את האפקטיביות).
- ✓ סובב את עט ג'ל ההלבנה עד להופעת הג'ל על המברשת ומרח את ג'ל ההלבנה בקדמת השיניים שלך. הימנע ממריחת הג'ל ישירות על החניכיים או החלק הפנימי של השפתיים למניעת תחושת עיקצוץ. אל דאגה באם זה קורה, תחושת העיקצוץ חולפת לאחר זמן מה.
- ✓ הנח את הפיה על השיניים, נשוך בעדינות והדלק את נורית ה-LED. הנורה תכבה מעצמה לאחר 15 דקות.
- ✓ לאחר שסיימתם שטפו את הפלטה הפה והשיניים במים. במידת הצורך ניתן להשתמש במברשת שיניים להוריד שאריות ג'ל מהשיניים.
- ✓ מומלץ שלא לאכול ו/או לשתות למעט מים, במהלך 30 דקות לאחר כל טיפול הלבנה.
- ✓ ג'ל ההלבנה אינו מתאים לכתרים ותותבות ואינו מתאים לטיפול בשינוי צבע השיניים, הנגרמת ממצבים רפואיים אחרים.
- ✓ באם הינך סובל ממצבים רפואיים שונים, מומלץ להתייעץ עם רופא שיניים לפני השימוש.

❖ השימוש בג'ל להלבנת שיניים אינו מתאים ולא מומלץ לילדים מתחת לגיל 12 או לנשים בהריון.
❖ כדי להגיע לגוון הלבן הרצוי מומלץ להשתמש בערכה פעם ביום למשך 30 ימים.

חיי מדף: 24 חודשים כאשר העט סגור. השלך לאשפה ג'ל הלבנה שנפתח ואינו בשימוש לאחר 21 חודשים.

אחסון: הימנע מחשיפה ישירה לאור השמש ואחסן במקום קריר ויבש. אין לשמור במקרר או במקפיא

רכיבים: Carbamide Peroxide, Glycerol, Propylene Glycol, Deionized Water, Carbomer, Carboxymethyl, Triethanolamine, Poly Vinylpyrrolidone, Menthol

למידע נוסף www.proclearaligners.org